

	SENSBIO TEST KATALOĐU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	



	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

İÇİNDEKİLER

1. TEST SONUÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLER	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2. GLUKOZ YÜKLEME TESTLERİ(OGTT-GLUKOZ TOLERANS TESTLERİ)	3
3. TESTLERE GÖRE SIK KULLANILAN ÖRNEK TÜPLERİ.....	3
4. KOAGÜLASYON TESTLERİ İÇİN KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.....	6
5. FLOW SİTOMETRİ TESTLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.....	7
6. İDRAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI	8
7. SENSBIO ANLAŞMALI LABORATUARLARI NUMUNE RED KRİTERLERİ	9
8. SONUÇ RAPORLANMASI VE RAPORLAMA SÜRELERİ.....	13
9. LABORATUVARA GELEN NUMUNELERİN SAKLANMASI VE İLAVE İSTEMLER.....	13
10. ANLAŞMALI LABORATUARLARIMIZDA ÇALIŞILAN TESTLER	14
Genetik Testler	114
Flow Sitometri Testler Ve Antikorlar	122

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

1. TEST SONUÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLER

Yaş ve Cinsiyetin Etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, enzim, lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. Örneğin: alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH, FSH gibi testler için kan gönderilirken, döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir.

Açlık Durumu: Genellikle laboratuvar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. Kırk sekiz saatten uzun süren açlık, serum bilirubin düzeylerinde artışa yol açmaktadır. Yetmiş iki saatten uzun süren açlık, kadınlarda açlık kan şekeri düzeyinin 45 mg/dL altında bulunmasına, erkeklerde ise trigliserid ve serbest yağ asidlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Besinlerin Etkisi: Et yenmesi plazma potasyumunu, trigliseridleri ve ALP enzimini yükseltir. ALP enzimi ayrıca B Rh ve O Rh kan grubuna sahip kişilerde özellikle yağlı yemeklerden 2 saat sonra artış göstermektedir.

Proteinden zengin gıda alımı; serum üre, amonyak ve ürat düzeylerini artırmaktadır. Muz, domates ve avokado gibi gıdalar serotonininden zengindir ve idrarla 5-HIAA atılımını artırmaktadır. Tüm bunlara ek olarak yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak ölçüm yapılan metodların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir. Kanda glukoz, trigliserid, kolesterol ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor), folat, vitamin B12, magnezyum gibi testler için kan örneği 10-12 saatlik açlık sonrası alınmalıdır.

Egzersizin Etkisi: Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri izlenir. Egzersiz sonrası kısa süreli olarak laktat, CK, AST, LDH yükselir. Bu değişiklikler egzersiz sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra normale döner. Egzersizin uzun süreli etkisi olarak CK, AST, LDH, plazma testesteronu, lutenizan hormonu yükselttiği bilinmektedir. Bu nedenle tetkik için laboratuvara gelmeden önce AĞIR VE ZORLAYICI EGZERSİZDEN KAÇINILMALI, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olunması önerilir.

Alkol alımı; Laktat, ürat ve trigliserid düzeylerini, kafein ise serbest yağ asidlerini artırmakta ve katekolamin salınımına neden olmaktadır. Kronik alkol tüketiminde gama-glutamil transferaz, ortalama eritrosit hacmi, ürat ve yüksek yoğunluklu kolesterol (HDL) artışı görülmektedir.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Sigara içimi ile; karboksihemoglobin artmakta, katekolamin ve kortizol düzeyleri artmaktadır. Ayrıca sigara içimi eritrosit ve lökosit sayısı ile ortalama eritrosit hacminin yüksek bulunmasına neden olmaktadır. Birçok ilaç Laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir.

Diurnal Ritm: Gün içerisinde bazı analitlerin salınımı, metabolizması ya da dolaşıma çıkmasında değişiklikler görülebilir. Mesela serum demiri 08.00-14.00 saatleri itibarıyla aynı hastanın iki ayrı zamandaki numunesine göre %50 gibi fark gösterebilir. Sabah 06.00 civarında serum kortizol düzeyleri pik yaparken, gece 00.00 de en düşük düzeylere inmektedir. Ayrıca öğleden sonra yapılan glukoz tolerans testlerinde glukoz değerleri sabah yapılanlara göre biraz daha yüksek çıkar. Kortizol, demir, vitamin B12, folat, TSH vb.testlerde günlük biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu nedenle, özellikle bu testler olmak üzere Laboratuvar tetkikleri için sabah açlık kan örneğinin verilmesi önerilir.

Stres ve anksiyete, hormon salınımını ve asid baz dengesini etkilemekte, lökosit sayısı, laktat ve serbest yağ asidi düzeylerini yükseltmektedir.

Postürün ve uzun süren turnike uygulamasının etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi olup plazma hacminde önemli farka neden olur. Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dâhil tüm proteinler, albumin, proteinlere kısmen bağlı kalsiyum, bilirubin, kolesterol ve trigliserid düzeyleri ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir. Yüksek ateş, serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler.

GENEL SAĞLIK TARAMASI İÇİN 10-12 SAATLİK AÇLIK SONRASI SABAH KAN VERİLMESİ,
TEST İÇİN KAN VERECEK KİŞİLER; GECE SAAT 21:00'DEN SONRA SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY
YEMEMELİ VE İÇMEMELİ VE BU SÜRE BOYUNCA SİGARA, ÇAY, KAHVEDEN SAKINMALI,
TETKİK İÇİN LABORATUVARA GELMEDEN ÖNCE AĞIR VE ZORLAYICI EGZERSİZDEN
KAÇINILMALI, KAN VERMEDEN ÖNCE YARIM SAAT KADAR DİNLENİLMELİ,
DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇLAR VAR İSE KESİLMEDE ÖNCE DOKTORA DANIŞILMASI
ÖNERİLİR.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

2. GLUKOZ YÜKLEME TESTLERİ(GTT-OGTT)

50 gram şeker yükleme testi: 24-28. gebelik haftaları arasında, gebelik diyabeti (şeker hastalığı) için yapılmaktadır. 50 gr. glukoz su içerisinde eritilir, içildikten 1 saat sonra hastadan kan alınır.

75 gram şeker yükleme testi: Hastanın aç olması ve 3 gün karbonhidrat içeren bir diyet yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekeri bakılır 75 gram glukoz suda eritilir, içildikten 2 saat sonra hastanın kanı alınır.

100 gram şeker yükleme testi: 50 gr. şeker yükleme testi anormal olan hastalar ile gebelik diyabeti için risk faktörü taşıyanlara yapılır. Hastanın aç olması ve 3 gün karbonhidrat içeren bir diyet yapılması gereklidir. İlk önce açlık kan şekeri bakılır. 100 gram glukoz suda eritilir, içildikten sonra birer saatlik aralar ile 3 defa kan alınır.

Şeker yükleme testi için, test öncesi 3 gün yeteri kadar karbonhidrat alınması (en az 150 gr/gün karbonhidrat) bu testi etkileyecek ilaç alınmaması ve test sırasında su, sigara vs içilmemesi ve bişey yenmemesi gerekir.

3. TESTLERE GÖRE SIK KULLANILAN ÖRNEK TÜPLERİ;

Kan Alım Hacmi	Renk Kodu	Tüp Cezidi	Kullanım Alanları	Ters Çevirme	Santrifüj Kosulları
		Kan Kültürü	Anaerobiğin takip ettiği aerobik - eğer her iki kültür şişesi için de yeterli kan yoksa, sadece aerobik olanı kullanın		
1.8 ml 2.7 ml 4.5 ml		Sodyum Sitrat	Koagülasyon çalışmaları için	3 - 4 kez	Devir: 2000 - 2500g Süre 10-15 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
1.6 ml 1.8 ml 2.4 ml 5 ml		Sodyum Sitrat ESR	Sedimentasyon çalışmaları için	8 - 10 kez	
2 ml 4 ml 6 ml 10 ml		Serum / Plastik	Serum çalışmaları için	5 - 6 kez	Devir: ≤ 1300g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2.5 ml 3.5 ml 5 ml 8.5 ml		SST™ II Advance	Serum çalışmaları için (Jelli)	5 - 6 kez	Devir: 1300 - 2000g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
3 ml 4 ml 6 ml 8 ml		Heparin	Plazma çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2 ml 3 ml 4 ml 6 ml		EDTA	Hematolojik çalışmalar için	8 - 10 kez	
4 ml 6 ml		Cross Match	Cross Match çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
2 ml 4 ml		Florür Oksalat, Florür EDTA	Glukoz çalışmaları için Glukoz, Laktat, HbA1c çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı
7 ml		Eser Element	Eser Element çalışmaları için	8 - 10 kez	Devir: ≤ 1300g Süre 10 dakika Sıcaklık: 25°C - Oda Sıcaklığı

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Hemoliz, eritrositlerin parçalanmasıdır. Hemoliz sonucunda, eritrosit içindeki maddeler seruma geçerler. Serumda hemoglobin konsantrasyonu 20 mg/dL'nin üzerinde olursa hemoliz olduğu gözle anlaşılır.

Eritrositlerden salınımı sonucu yüksek ölçülen parametreler	
Potasyum	Magnezyum
LDH	AST
Protein	Demir
Fosfat	Amonyak
Analitik etkileşim sonucu yüksek ölçülenler	
Total Kolesterol	Trigliserid
CK	CK-MB
Analitik etkileşim sonucu düşük ölçülenler	
Bilirubin	Albumin
Karoten	İnsülin

4. KOAGÜLASYON TESTLERİ İÇİN KAN ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Enjektör ile kan alınması durumunda düşük hacimdeki (2 ml) enjektörler kullanılmalıdır. Hava sızdırmamasına dikkat edilmelidir.

Enjektör ile alınan kan enjektör iğnesi çıkartılıp koagülasyon tüpünün kapağı açılarak normal bir hızda tüp aktarılmalıdır.

Enjektörden koagülasyon tüpüne kan aktarımı 1 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.

Turnike uygulamasında, hasta kolu şiddetle sıkılmamalı ve koagülasyon tüpüne kan alımına başlar başlamaz turnike çözülmalıdır.

Eğer birden fazla tüpe kan alınacaksa kan alımında belirlenen sıraya göre tüplere kan alınmalıdır.

Kan alımında kullanılan koagülasyon tüpünün üzerinde bulunan seviye çizgisine kadar kan alınmalıdır.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Fazla ya da az alınan kan hatalı sonuçlara yol açar.

Kan tüpe alındıktan sonra 3-4 kez alt üst edilmelidir. Çok fazla karıştırma işlemi hemolize yol açar.

Hastaya heparin verilen hattan kan alınmamalıdır. Bu hatalı yüksek sonuçlara yol açar. Eğer heparin verilen hattan kan alınmak zorunda kalınıyorsa hasta damar yoluna 5 ml salin solüsyonu verilmeli bundan sonra alınan kanın ilk 5 ml'si atılmalı, daha sonrasında koagülasyon tüpüne kan alınmalıdır.

5. FLOW SİTOMETRİ TESTLERİ İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Hücrede çalışılan Flow Sitometri testleri için antikoagülan EDTA içeren vakumlu tüp olmalıdır. BAL ve BOS numuneleri kullanılan tetkikler için antikoagülan (boş, kuru) tüp kullanılmaktadır.

Tüm immünofenotipleme örneklerinin ortam ısısında (17-25 °C) taşınması gereklidir. Daha soğuk ya da daha sıcak ortamlarda örnek transportu hücre membranında değişikliklere yol açarak antijenlerin saptanma oranlarını etkilemektedir.

Takip gerektiren örneklerin (belirli zaman dilimlerinde yeniden ölçüm yapılması gereken örneklerin) günün aynı saatinde alınması sonuçların karşılaştırılabilirliği açısından önemlidir.

Solid doku örnekleri mutlaka dondurulmadan ve fiks edilmeden en geç 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. İdeal taşıma ve saklama yöntemi steril bir kapta serum fizyolojik içinde örneğin gönderilmesidir. Islatılmış sargı bezi içinde gönderilen örneklerde hızla hücre ölümü gerçekleşmesi nedeni ile analiz yapılamamaktadır.

BAL numunesi (bronko alveoller lavaj) (+4 °C) numune alınır alınmaz laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Periferik Kan ve Kemik İliği numuneleri alındıktan sonra 72 saat içinde oda ısısında laboratuvara ulaştırılmalıdır.

EMA bağlama testi için numune 7 gün içerisinde, Osmatik fragilité testi 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Numunelerin cuma günü saat 12.00'ye kadar laboratuvara teslim edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle numunelerin nakliye zamanına mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda alınması önerilir.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- ✓ Kimlik bilgileri belirtilmemiş ya da yetersizse.
- ✓ Çift isim gibi karmaşaya sebep olacak şekilde işaretlenmiş test tüpleri varsa.
- ✓ Hücrede çalışılan testler için pıhtılı kan örneği tespit edilmişse,
- ✓ Gönderen doktorun adı soyadı, hastanın klinik öyküsü, kanın alınma tarihi ve saati, hastanın adı soyadı ve doğum tarihi bilgilerini içermeyen isteklerde,
- ✓ Numune bilgileriyle barkod bilgileri arasında tutarsızlık bulunduğu

Yukarıda listelenen durumlardan herhangi biri mevcutsa; laboratuvar ilgili kurum ile iletişim kurar. Bu durumu çözülmemiyorsa, numune reddedilir.

6. İDRAR ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

6.1. TAM İDRAR TETKİKİ

- ✓ Rutin idrar incelemesi için sıklıkla sabah alınan ilk idrar örneği tercih edilmektedir. Mesanede beklemiş olan bu idrar örneği konsantre olduğundan, protein ve silindirlerin analizi için idealdir. Bunun söz konusu olmadığı durumlarda mesanede en az dört saat beklemiş örnekler kullanılabilir.
- ✓ İdrar temiz ve kuru bir plastik kaba alınmalıdır.
- ✓ Âdet kanaması ya da vajinal akıntı varlığında, rutin idrar incelemesi yapılacaksa, idrar kültürü için alınan orta akım idrar örneği tercih edilmeli ve hastaya nasıl toplayacağı tanımlanmalıdır.
- ✓ İdrar örneği en kısa zamanda, 30 dakika içinde Laboratuvara ulaştırılmalı ve çalışılmalıdır. Oda ısısında bekleyen idrar örneğinde hücre sayısı ve içerik yönünden önemli değişiklikler meydana gelmektedir.

6.2. 24 SAATLİK İDRAR ÖRNEĞİNİN TOPLANMASI

- ✓ 24 saatlik idrarın tam ve doğru olarak toplanmış olması ve tamamlandıktan sonra derhal çalışılacak Laboratuvara teslim edilmesi sonuçların güvenilirliğini etkilediğinden aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.
- ✓ 24 saatlik idrarın toplanmaya başlanacağı sabah uyandıktan sonra ilk idrar tualete boşaltılır ve bu saat not edilir (örneğin sabah saat 08.00)
- ✓ Bu andan itibaren 24 saatlik tüm idrar gündüz ve gece boyunca dikkatlice temiz ve kuru bir kaptan biriktirilir.
- ✓ Ertesi sabahki idrar da (örneğin ertesi sabah saat 08.00'deki idrar) toplama kabına eklenerek, idrar toplama işlemi tamamlanır.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- ✓ İdrar toplanan kabın temiz olması çok önemlidir. 3-5 litrelik temiz ve kuru bir kap temin edilir. Su için kullanılan pet şişeler en uygundur. Kola, deterjan gibi maddelerin konmuş olduğu kaplar kesinlikle uygun değildir.
- ✓ Örneğin bitirme süresince evin en serin yerinde, kesinlikle ışık almayan karanlık bir ortamda saklanması gerekmektedir. Her idrar ilavesinde tüm idrar karıştırılır.
- ✓ Birinci idrar toplama kabı dolarsa, başka idrar toplama kabına geçildiğinde bir önceki kapta bulunan idrarın yaklaşık yarısı da bu kaptakiyle karıştırılır.
- ✓ İdrar toplama kabı siyah, ışık geçirmeyen bir poşet içinde bekletmeden laboratuvara getirilir. Bazı analizler için 24 saatlik idrar örneklerinin özel koruyucu maddeler üzerine toplanması gerekmektedir (Örneğin 10 mL konsantre (6 mol/L) hidroklorik asid (HCl) üzerine).
- ✓ 24 saatlik idrarda yapılacak özel testler için herhangi bir yiyecek ya da içecek kısıtlaması olup olmadığı örneğin toplanmasından önce hastaya kesinlikle belirtilmelidir.

İDRAR KORUYUCULARI:

<u>TEST ADI</u>	<u>ODA</u> <u>ISISI</u>	<u>BUZDOLABI</u>	<u>DONMUŞ</u>	<u>6N</u> <u>HC</u> <u>L</u>	<u>ASETİK</u> <u>ASİT %50</u>	<u>BORİK</u> <u>ASİT</u>	<u>TRANSPORT</u>
<u>ALDOSTERON</u>	+	+	+	-	-	+	<u>SOĞUK</u>
<u>AMİNO</u> <u>ASİTLER</u>	-	+	+	-	-	-	<u>SOĞUK</u>
<u>AMİNOLEVUNİ</u> <u>LİK ASİT</u>	-	+	-	+	+	-	<u>SOĞUK</u>
<u>ARSENİK</u>	+	+	+	+	+	+	<u>SOĞUK</u>
<u>BAKIR</u>	+	+	+	+	+	+	<u>SOĞUK</u>
<u>CİVA</u>	+	+	+	+	+	+	<u>SOĞUK</u>
<u>ÇİNKO</u>	+	+	+	+	+	+	<u>SOĞUK</u>
<u>5-</u> <u>HİDROKSİİND</u> <u>L ASETİK ASİT</u>	-	+	-	+	+	-	<u>SOĞUK</u>
<u>HOMOVANİLİK</u> <u>ASİT</u>	-	+	-	+	+	-	<u>SOĞUK</u>
<u>İYOT</u>	+	+	-	-	-	-	<u>SOĞUK</u>
<u>KADMIYUM</u>	+	+	+	+	+	+	<u>SOĞUK</u>

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

KALSIYUM	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
KATEKOLAMİNLER (EPİNEFRİN, NOREPİNEFRİN, DOPAMİN, METANEFİRİN, NORMETANEFİRİN)	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
17-KETOSTEROİDLER	-	+	+	-	+	-	SOĞUK
KORTİZOL	-	+	+	-	+	+	SOĞUK
KURŞUN	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
MİKROALBÜMİN	+	+	+	-	-	-	SOĞUK
OKSALAT	-	+	+	+	+	+	SOĞUK
PORFİRİNLER	-	+	-	-	-	-	SOĞUK
PRİDİNOLİN	-	-	+	+	+	+	DONMUŞ
SİSTİN	-	+	+	-	-	-	SOĞUK
ÜRİK ASİT	-	+	+	-	-	+	ODA İSİSİ
VANİLMANDELİK ASİT	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
TEST ADI	ODA İSİSİ	BUZDOLABI	DONMUŞ	6N HC L	ASETİK ASİT %50	BORİK ASİT	TRANSPORT
ALDOSTERON	+	+	+	-	-	+	SOĞUK
AMİNO ASİTLER	-	+	+	-	-	-	SOĞUK
AMİNOLEVUNİLİK ASİT	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
ARSENİK	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
BAKIR	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
CİVA	+	+	+	+	+	+	SOĞUK

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

ÇİNKO	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
5-HİDROKSİİNDOL ASETİK ASİT	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
HOMOVANİLİK ASİT	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
İYOT	+	+	-	-	-	-	SOĞUK
KADMIYUM	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
KALSİYUM	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
KATEKOLAMİNLER (EPİNEFRİN, NOREPİNEFRİN, DOPAMİN, METANEFİRİN, NORMETANEFİRİN)	-	+	-	+	+	-	SOĞUK
17-KETOSTEROİDLER	-	+	+	-	+	-	SOĞUK
KORTİZOL	-	+	+	-	+	+	SOĞUK
KURŞUN	+	+	+	+	+	+	SOĞUK
MİKROALBÜMİN	+	+	+	-	-	-	SOĞUK
OKSALAT	-	+	+	+	+	+	SOĞUK
PORFİRİNLER	-	+	-	-	-	-	SOĞUK
PRİDİNOLİN	-	-	+	+	+	+	DONMUŞ
SİSTİN	-	+	+	-	-	-	SOĞUK
ÜRİK ASİT	-	+	+	-	-	+	ODA İSİSİ
VANİLMADELİK ASİT	-	+	-	+	+	-	SOĞUK

6N HCL: 10 ML, ASETİK ASİT % 50: 10 ML, BORİK ASİT KRİSTALİ: 5 GR +*: TERCİH EDİLEN YÖNTEM

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

7. SENSBIO ANLAŞMALI LABORATUVARLARI NUMUNE RED KRİTERLERİ

- ✓ Hasta adı ve soyadının bulunmadığı (barkodu olmayan), örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda örnek kabulü yapılmaz. (Sistem arızası olduğunda (barkod basılamadığında), laboratuvar sorumlusunun Laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır.)
- ✓ Uygun tüplere alınmayan örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Aşırı Hemolizli örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Lipemik örnekler geldiğinde HBYS'nin açıklama kısmında belirtilir.
- ✓ Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa, altında isim olup olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır.
- ✓ Tüp içindeki örnek miktarı yeterli değilse örnek kabul edilmez.
- ✓ Antikoagülanlı tüplerde pıhtılı örnekler kabul edilmez.
- ✓ Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.
- ✓ Özellikle ilaç düzeyi ve diürenal varyasyonu olan hormon analizlerinde, gereken bekleme süresine uyulmamışsa, örnek kabul edilmez.
- ✓ Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Kırık veya steril olmayan kaplar ile gönderilen örnekler kabul edilmez.
- ✓ Formalin içindeki örnekler Laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Agar üzerine ekim yapılmış ve kurumuş örnekler
- ✓ Baryum, kimyasal boyalar ve yağlı kimyasal maddeler ile kontamine olan materyaller
- ✓ Foley kateter ucu (üretra florasını yansıtır)
- ✓ Kan kültürü hariç 1 günde, 2'den fazla alınan materyaller
- ✓ Birçok inceleme için tek eküvyon çubuğu ile gönderilmiş ise (örneğin; aerob, anaerob, fungus ve tbc için tek örnek gibi)
- ✓ Steril şartlarda olmayan, uygun alınmamış, dışına sızma olmuş veya herhangi bir şekilde kontamine olmuş örnekler
- ✓ Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir.
- ✓ Flora ile kontaminasyon olasılığından dolayı hatalı veri sağlama ihtimali bulunan örnekler reddedilir.
- ✓ Mantar ve mikobakteri incelemesi dahil 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar örnekleri laboratuvara kabul edilmez.
- ✓ Balgamın makroskopik olarak değerlendirilmesinde tükürük görünümünde olması

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- ✓ Boyama için gönderilen materyallerin taşıma besi yerinde gönderilmesi durumlarında örnek reddedilir.

Yukarıda belirtilen maddelerin bulunması halinde hasta örneği **reddedilir**, ilgili bölüm bilgilendirilir ve yeni örnek isteği yapılır. Bu durum otomasyon sistemi üzerinden tetkik istemini yapan bölüme bildirilir. Reddedilen numune laboratuvarda saklanır.

8. SONUÇ RAPORLANMASI VE RAPORLAMA SÜRELERİ

Testlerin Sonuçlanma Süreleri

Laboratuvar test kataloğunda her bir testin çalışma süreleri ve rapor tarihleri bulunmaktadır. Ayrıca sistemimize dahil kurumlar hastaların kayıtları yapıldıktan sonra sistemde anlaşmalı laboratuvar web sayfaları üzerinden muhtemel rapor tarihini görebilmektedir.

9. LABORATUVARA GELEN NUMUNELERİN SAKLANMASI VE İLAVE İSTEMLER

Laboratuvarın çalışma prensibi olarak, anlaşmalı laboratuvarlarımıza gelen ve kaydı yapıp çalışılan numuneler, ileri tetkikler veya test tekrarları için serumlar; buzdolabında/derin dondurucuda 2 hafta, tam kan örnekleri; buzdolabında 1gün boyunca saklanır. Eğer testler çalışma gününden önce geldi ise, çalışma gününe kadar da aynı şekilde saklanır. Daha ileri süreli saklamaya ihtiyaç duyulursa -20°C de veya -70°C de saklanır.

Şayet ilave bir analiz talebiniz olursa lütfen bizimle iletişime geçin, **03125020404** ilave numune ihtiyacı olursa bu tarafınıza bildirilecektir.

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

10. ANLAŞMALI LABORATUARLARIMIZDA ÇALIŞILAN TESTLER

RIA	Radioimmunoassay
ECLIA	Enzyme-linked chemiluminescent Immunosorbent Assay
EIA	Enzyme Immunoassay
HPLC	High Performance Liquid Chromatography
LC-MS MS	Liquid Chromatography - Mass Spectrometry
IFA	Immunofluorescent Antibody Assay
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
FIA	Fluorescent Immunoassay
ELFA	Enzyme - Linked Fluorescent Assay
PCR	Polymerase Chain Reaction
IHA	Indirect Hemagglutiny
GC-MS	Gas Chromatography Mass Spectrometry
RT-PCR	Real Time Polymerase Chain Reaction
PCR-SSP	Polymerase Chain Reaction Single Specific Primer
RID	Radialimmunodiffusion
ISE	Ion Selective Electrode
AAS	Atomic Absorption Spectrometry
PEG	Polyethylene Glycol
FPIA	Fluorescent Polarisation Immunoassay

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Test Adı	Numune Türü ve Miktarı		Metot	Çalışma Günleri	Rapor Tarihi
≠ 1,25 Dihidroksi Vitamin D	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Oniki gün sonra Saat 12:00
Androstenedion	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠1- Hidroksipiren	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠11-Deoksikortizol	Serum	1 mL	RIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
17 OH-Progesteron	Serum	1 mL	ELISA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ 17-Hidroksikortikoidler (17- Ketosteroidler)	İdrar (Spot, 24 saat)	2,5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠ 2,5 Hekzandion	İdrar (Spot)	5 mL	GC-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

25 OH Vitamin D	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ 5-Hidroksi Indol Asetik Asit (5-HIAA)	İdrar (Spot, 24 saat)	2,5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠5' - Nükleotidaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
≠ ACE (Angiotensin Converting Enzyme)	Serum, Heparinli Plasma veya BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 12: 00
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.)	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Adacık Hücre Antikoru (Islet cell antikoru)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Adenovirus IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat:12.00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Adenovirus IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat:12.00 (saat 10.00 dan sonra	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Adenovirüs Antijeni	Gaita	5 g	İmmün Kromatografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)	Serum, Plevra, BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ ADH (Antidiüretik Hormon, Vazopressin)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.)	1 mL	RIA	Çarşamba (salı günü saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Adrenalin (Epinefrin)	İdrar (24 Saatlik veya Spot) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır	5 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠ Adrenalin (Epinefrin)	EDTA Plazma	1 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra saat 18:00
Aktive Parsiyel Tromboplastin zamanı (aPTT)	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülo metrik	Hafta içi her gün (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Aktive Protein C Rezistansı (APC Rezistansı)	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülo metrik	Perşembe (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya	İki gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır.)	
≠ ALA (Aminolevulinik asit)	Spot İdrar Örnek alımından 24 saat önce ve örnek alımı boyunca alkol tüketilmemelidir.	5 mL	EIA	Çarşamba (Saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 12:00
Alanin Aminotransferaz (ALT)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Albumin	Serum, BOS	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Aldolaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Pazartesi (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
Aldosteron	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠Aldosteron	İdrar (Örnakler Soğuk Ortamda Gönderilip, Saklanmalı)	5 mL	RİA	Salı, Perşembe ve Cumartesi	Altı iş günü içerisinde saat 18:00
Alerji Beslenme (Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Pazartesi günü saat 10:00
Alerji Çocuk (Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Pazartesi günü saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Alerji Solunum (Türkiye) Paneli	Serum	1 mL	EIA	Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Pazartesi günü saat 10:00
Alfa-1 Antitripsin	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
Alfa-Fetoprotein (AFP)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Alkalen Fosfataz (ALP)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Alkalen fosfataz izoenzimleri	Serum	1 mL	Elektroforez	Laboratuvara danışınız	
≠ Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)	Serum	1 mL	Fotometrik	Pazartesi (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Alüminyum	Heparinli lacivert kapaklı tüp veya İdrar (Spot veya 24 saatlik) (Soğuk Ortamda Saklanmalı)	1 mL 5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
Amilaz	Serum veya İdrar	1 mL 5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Amiloid A	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				15:00 (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	saat 18:00
≠ Amino Asitler	EDTA'lı plazma-Serum, BOS veya İdrar	1 mL 5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠ Amip Antijeni (Entamoeba H.)	Gaita	5 g	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Akut Miyeloid Lösemi Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
AML MRD Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Amip Antikoru (Entamoeba H.)	Serum	1 mL	ELİSA	Salı Saat 12.00 (Pazartesi'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Amonyak (NH3)	EDTA'lı plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. (Heparinli plazma kabul edilmemektedir.)	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
ANCA Tarama (c-ANCA ve	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	İki gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

p-ANCA)				10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10:00
Androstenedion	Serum (Kırmızı kapak tercih edilir)	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti DNase-B	Serum	1 mL	EİA	Salı (Pazartesi 'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 10:00
Anti ds-DNA Tarama	Serum	1 mL	ELİSA	Çarşamba ve Cuma (Çalışma Günlerinden bir gün önce 18:00'a kadar numuneler	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				ulaştırılmalı)	
Anti ds-DNA Tarama	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti düz kas antikoru (ASMA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş gün sonra saat 18:00
Anti Endomisyum IgA	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi ve Çarşamba (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Endomisyum IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi ve Çarşamba (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Anti Faktör Xa	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Gliadin IgA	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi ve Çarşamba (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Gliadin IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi ve Çarşamba (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti Hepatit E (HEV)	Serum	1 mL	EİA	Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Pazartesi saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Anti Jo-1	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Jo-1	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profili (ANKA Tarama)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Pariyetal Antikor (APA)	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠Anti Pariyetal Antikor (APA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Ribozomal P Protein	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Ribozomal P Protein	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti Sentromer	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler)	Üç gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				ulaştırılmalı)	
Anti Sentromer	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Anti Sperm Antikor (ASA)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	2 hafta sonra Cumartesi
Antibiyotik duyarlılık testi	Genç bakteri suşu		Disk Difüzyon	Hafta içi hergün saat 15:00	İki gün sonra saat 10:00
Anti-Fosfatidil Serin IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Fosfatidil Serin IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Fosfolipid IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Salı (Çalışma gününden bir gün önce 18:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Fosfolipid IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Salı (Çalışma gününden bir gün önce 18:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorları)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)	Serum	1 mL	ELİSA	Çarşamba günü saat 13:00 (Salı'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
Anti-HBc IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBc Total (IgG)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBe	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Anti-HBs	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-HCV	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-Histone	Serum	1 mL	İFA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-İnsülin Antikoru	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG)	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Kardiyolipin Antikoru IgM (ACA IgM)	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Mitokondrial Antikor (AMA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş gün sonra saat 18:00
Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA)M-2	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Antimon	Jelli Tüp, Mor Kapaklı Tüp, İdrar Kabı	1 mL 5mL	ICP-MS	Hafta içi her gün	On beş gün sonra saat 10:00
Anti-müllerian Hormon (AMH)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-Nükleer Antikor (ANA)	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi- Çarşamba Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün 18:00
Anti-Nükleer Antikor (ANA)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir	Üç gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
Anti-Scl 70	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Scl 70	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Sm	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Sm	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Sm/RNP	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Sm/RNP	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Anti-Tiroglobulin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Anti-TPO (Tiroid peroksidaz antikorları)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Antitrombin III Aktivite	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Çarşamba'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Apolipoprotein A	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Apolipoprotein B	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ APTT-LA	Sitratlı Plazma (Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve DONDURULARAK gönderilmelidir.)	1 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Çarşamba'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Aquaporin-4 (Anti-NMO)	Serum, BOS	1 mL	İFA	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Araşidonik Asit (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)	4 tüp Sitratlı Plazma	3 mL		Laboratuvara danışınız.	
≠ ARB aranması	Balgam, bronşiyal lavaj, idrar ve diğer sıvılar	1 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
≠ Arsenik	İdrar	5 mL	ICP-MS	Hafta içi her gün	On beş gün sonra saat 10:00
≠ Arsenik eritrosit içi	Heparinli Tam Kan	1 mL	ICP-MS	Hafta içi her gün	On beş gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

ASCA IgA (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
ASCA IgG (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Asetaldehid	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi her gün	Otuz gün sonra saat 10:00
≠ Asetaminofen (Parasetamol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Asetilkolin Reseptör Antikor (ACRH)	Serum	1 mL	RİA	Pazartesi, Çarşamba (Çalışma gününden en geç bir gün önce 10:00'a kadar numune laboratuvara ulaştırılmalı)	Yedi iş günü içinde
ASO (Antistreptolizin O)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Aspartat Aminotransferaz (AST)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir	Dört gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
B ALL MRD Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik iliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
B ALL MRD Paneli (Bilatimumab Tdv)	EDTA'lı Tam Kan Kemik iliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Bakır (Eritrosit içi)	Heparinli Tam Kan	3 mL	AAS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün Sonra saat 18:00
≠ Bakır	İdrar (Soğuk ortamda saklanmalıdır.)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On iki Gün Sonra saat 18:00
≠ Bakır	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On Gün Sonra saat 18:00
Bakteri tanımlama	Kültür		Yarı otomatik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
Balgam Kültürü	Balgam (steril bir kaba konur)		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Baryum (Ba)	Serum (Jelli Tüp)	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On Gün Sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Benzen	Spot İdrar	5 mL	GC MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra saat 18:00
≠ Berilyum	Tam Kan (EDTA)	1 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra saat 18:00
Beta 2-mikroglobulin	Serum-İdrar	1 mL 5 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Beta-hCG (Kantitatif)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Aynı Gün Saat: 18:00
Bikarbonat (HCO ₃)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Bilirubin (direk)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Bilirubin (Total)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Biotinidaz Aktivitesi	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00
≠ Bizmut (Bi)	Tam Kan (EDTA)	1 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
≠ BNP (Brain natriüretic peptide)	EDTA'lı Plazma	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Boğaz Kültürü	Boğaz Sürüntüsü Oda Isısında		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Borrelia Burgdorferi Antikor IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün	Beş gün sonra saat 18:00
Borrelia Burgdorferi Antikor IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün	Beş gün sonra saat 18:00
≠ BOS İmmunelektroforez	BOS ve Serum	1 mL	Elektroforez	Salı saat 13: 00 (Pazartesi' den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
BOS Kültürü	BOS	1 mL	Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Boyalı Mikroskopik inceleme	BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve sürüntü örnekleri		Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
Boyasız direkt Mikroskopik inceleme	BOS, Balgam, Vücut sıvıları veya akıntı ve sürüntü örnekleri		Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
≠ Böbrek taşı analizi	Taş		Kolorimetrik	Hafta içi hergün	Sekiz gün sonra saat 10:00
Bronkoalveolar Lavaj İmmüfenotiplendirme	Bal		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Bronkoalveolar Lavaj	Bal		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat	Dört gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

CD4 / CD8 Sayımı				13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	sonra saat 10:00
≠ Brucella aglütinasyon testi (2-merkapt etanol ile)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Brucella aglütinasyon testi (Coombs anti serumu ile) (Wright)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Brucella IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi saat 09:00 (Cumartesi saat 09:00'a kadar kabulü yapılan numuneler çalışmaya dahil edilir.)	İki gün sonra saat 18:00
Brucella IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi saat 09:00 (Cumartesi saat 09:00'a kadar kabulü yapılan numuneler çalışmaya dahil edilir.)	İki gün sonra saat 18:00
Burun Akıntısı Kültürü	Serum		Kültür	Hafta içi hergün	İki gün sonra saat 18:00
Büyüme Hormonu (Growth hormon, sTH)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ C1 Esteraz İnhibitörü	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ C1 Esterase İnhibitor activity (Fonksiyonel)	Sitratlı plazma	1 mL	Nefelometrik	Pazartesi günleri çalışılır. (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün sonra
C3 (Kompleman 3)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
C4 (Kompleman 4)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
CA 125 (Kanser antijen 125)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CA 15-3 (Kanser antijen 15-3)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CA 19-9 (Karbonhidrat antijen 19-9)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CA 72-4 (Kanser antijen 72-4)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelennmuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
c-ANCA (PR3 ANCA)	Serum	1 mL	ELİSA	Perşembe Günü (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Candida Albicans Aranması			Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
CD34 Analizi	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş gün sonra saat 18:00
CD4	Edta'lı Tam Kan BAL Örneği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş gün sonra saat 18:00
CD8	Edta'lı Tam Kan BAL Örneği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş gün sonra saat 18:00
CEA (Karsinoembriyonik Antijen)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennmuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ CH 50 Kompleman Aktivitesi	Serum	1 mL	EİA	Cuma saat 13:00 (Saat 10.00 'dan sonra gelen numuneler bir	İki gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
Chlamydia trachomatis Antijeni	İdrar, Sürüntü	5 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Chlamydia Pneumoniae IgG	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Chlamydia Pneumoniae IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelennumuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Chlamydia Trachomatis IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Salı günü (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Chlamydia Trachomatis IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Salı günü (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Chlamydia Trachomatis PCR	İdrar, Swap		PCR	Salı Saat 12.00 (pazartesi gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Civa, Eritrosit içi	EDTA'lı Tam Kan	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş Gün Sonra
≠ Civa	EDTA'lı Tam Kan, İdrar	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş Gün Sonra
CK (Total Kreatin Kinaz)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ CK İzoenzim Elektroforezi	Serum	1 mL	Elektroforez	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir ay sonra saat 18:00
CK-MB	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ CK-MB (mass ölçümü)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Clostridium Difficile Toksin A	Gaita	5 g	İmmünokroma tografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Clostridium Difficile Toksin B	Gaita	5 g	İmmünokroma tografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
CMV IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CMV IgG Avidité Testi	Serum	1 mL	ELFA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ CMV PCR	EDTA'lı Plazma (tercih edilir),	1 mL	PCR	Perşembe Saat 12.00 (çarşamba gününe	İki gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	Serum, BOS, İdrar			kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	18:00
CMV IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
C-Peptid	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
CRP (C Reaktif Protein)	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Cryptosporidium antijen	Gaita	5 g	İmmünokroma tografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Ctx (Beta Cross)	EDTA'lı Plazma, Serum	1 mL	ECLİA	Pazartesi saat 12:00 (Cuma günü sonrasında gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç gün sonra saat 18:00
Çinko	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Çinko (eritrosit içi)	EDTA'lı plazma	2 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş Gün Sonra saat 10:00
Çinko	İdrar	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı Gün Saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C:22, C:24, C:26) analizi (GC/MS)	EDTA'lı plazma	1 mL	GC-MS	Cumartesi saat 15:00 (Cuma'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün Sonra saat 10:00
D-Dimer	Sitratlı plazma	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Delta Antijeni (Hepatit D virüs antijeni)	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Delta Antikoru (Hepatit D virüs antikoru)	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
Demir	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Demir Bağlama Kapasitesi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
≠ Deoksipiridinolin	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	HPLC	Çarşamba (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi saat 10:00
Deri lezyon Kültürü	Lezyon		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan	Üç gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	10:00
≠ Desmoglein-1 abs	Serum	1 mL	IFT	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir ay sonra
≠ Desmoglein-3 abs	Serum	1 mL	IFT	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir ay sonra
DHEA (Dehidroepiandrosteron)	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Sekiz gün sonra
DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Diamin Oksidaz (DAO)	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe günleri çalışılır. (Pazartesi ve Çarşamba 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
Digoksin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
≠ Dihidrotestosteron (DHT)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On dört gün sonra
Direkt Coombs	EDTA'lı plazma	1 mL	Jel Filtrasyon	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen	İki gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Doku transglutaminaz Ig A	Serum	1 mL	ELİSA	Salı- Perşembe 12:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün 18:00
Doku transglutaminaz Ig G	Serum	1 mL	ELİSA	Salı- Perşembe 12:00 (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün 18:00
≠ Dopamin, İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) _ 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/ MS	Hafta içi hergün (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 10:00
≠ Dopamin, Plazma	EDTA Plazma	1 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Bir hafta sonra
Dörtlü Tarama Testi	Serum	3 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Üç iş günü sonra 18:00
≠ EBV EA IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ EBV EA IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı ve Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
EBV EBNA IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Dört iş günü sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	18:00
≠ EBV EBNA IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Üç iş günü sonra 18:00
EBV VCA IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ EBV VCA IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı-Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Echinococcus Granulosus IgG	Serum	1 mL	İFA	15 günde bir pazartesi günü çalışılır	İki gün sonra saat 10:00
EMA Bağlama Testi	EDTA'lı tam kan Kemik iliği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
ENA Tarama (12'li Panel) RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) ds-DNA, sentromer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA	Serum	1 mL	İmmunoblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
ENA Tarama (6'lı Panel) (RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1)	Serum	1 mL	ELİSA	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
ENA Tarama (18'li Panel) RNP/SM, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, ds-DNA, sentromer,	Serum	1 mL	İmmunoblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar	Üç gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

<i>nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA, PM-Scl, Mi-2, Ku, U1-snRNP,</i>				numuneler ulaştırılmalı)	
Eozinofil (Total)	EDTA'lı plazma	3 ml	Cell Counter + Mikroskopik	Hafta içi her gün (Saat 15.00 'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Eozinofil Katyonik Protein (ECP)	Serum	1 mL	CLİA	Salı ve Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
Eritropoetin (EPO)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
Estradiol (E2)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Estriol (E3)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı)	Sitratlı kan; sitratlı sedim tüplerine işaretli çizgiye kadar kan alınır.		Fotosedimentasyon	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Etil Alkol, Serum	Serum+Gri kapaklı floridli tüp (Sekonderde örnek kabulü)	3 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	<u>yapılmaz</u>)			kalır)	
≠ Everolimus	EDTA'lı Tam Kan	5 mL	LC-MS/ MS	Salı, Perşembe (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör II (Protrombin)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör II İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör IX (Christmas)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör IX Antikoru	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör IX İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör V (Proakselerin	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör V İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan	İki gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	10:00
≠ Faktör VII (Prokonvertin)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör VII İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör VIII	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör VIII İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör VIII Antikoru	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör X (stuart Faktör)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör X İnhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	İki gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır	
≠ Faktör XI	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör XI inhibitörü	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör XII (Hageman Faktörü)	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
≠ Faktör XIII	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 10:00
Fekal Kalprotektin	Gaita	5 g	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Fenilalanin	Filtre kâğıdı kartında 3 dolu daire		LC-MS-MS	Pazartesi, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Fenilglisiklik Asit	İdrar	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün	15 Gün sonra
≠ Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi Gün Saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Fenobarbital (Luminal)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Sekiz Gün Sonra Saat 18:00
Fenol	İdrar	5 mL	Spektrofotometrik	Hafta içi hergün	On beş Gün sonra
Ferritin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Fibrinojen	Sitratlı Plazma	3 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Fitnik asit	EDTA'lı plazma	3 mL	GC-MS	Çarşamba Saat 12.00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	15 Gün sonra
Folik Asit	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Fosfor	Serum (8 -10 saatlik açlık gerektirir)	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>
Fosfor (İdrar)	İdrar (Spot-24 Saat)	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	<i>Aynı Gün Saat: 18:00</i>

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
Fronkül kültürü	Sürüntü		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Fruktozamin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat 18:00
FSH (Folikül stimulan Hormon)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
FT3 (serbest Triiyodotironin)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
FT4 (serbest Tiroksin)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen umuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ FTA-ABS IgG FTA-ABS IgM	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün	On beş Gün sonra
Gaita Kültürü	Gaita		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Gaita steatokrit	Gaita		Mikroskopik	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
Gaitada Amip	Gaitada (Numune 30dk. İçinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.)		Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen umuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
Gaitada Gizli Kan	Gaita		İmmuno	Hafta içi her gün	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

			Kromatografik		saat 10.00
≠ Gaitada Hazım	Gaita		Mikroskopik	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 10:00
Gaitada Parazit	Gaita		Mikroskopik	Hafta içi hergün	Ertesi gün saat 10.00
Gaitada PH	Gaita		Kolorimetrik	Hafta içi hergün	Ertesi gün saat 10.00
≠ Gaitada Sterkobilin Aranması	Gaita		Mikroskopik	Hafta içi hergün	İki gün sonra Saat: 18:00
≠ Galaktomannan Antijeni	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi ve Perşembe (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ Gangliosit Antikorları (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1a, GT1a, GQ 1B)	Serum	1 mL	İmmunblot	Salı saat 12:00 (Pazartesi'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra Saat: 18:00
≠ Gardnerella Vaginalis PCR	Vücut sıvıları		PCR	Salı saat 12.00 (Pazartesi saat 15:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra Saat: 18:00
≠ Gastrin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18.00
GGT (Gama Glutamil Transferaz)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Giardia Antijeni	Gaita		İmmuno Kromatografik	Hafta içi her gün	İki gün sonra Saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Glikojen depo hastalıkları, Karaciğer profili	EDTA'lı tam kan	3 mL	Laboratuvara danışınız	Laboratuvara danışınız	
≠ Gıda İntolerans Testi	Laboratuvara danışınız		Laboratuvara danışınız	Laboratuvara danışınız	
Glukoz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Glukoz (İdrar)	İdrar (Spot)	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
≠ Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz(G6PD)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
Glukoz Tolerans testi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Gonokok Aranması	Kültür Materyali		Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı Gün Saat: 18:00
Gonokok Kültürü			Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Göz (Konjonktiva) Kültürü	Göz sürüntüsü		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu)	Serum	1 mL	Lateks	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen	İki gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Haptoglobin	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 10:00
HAV IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HAV IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HBeAg	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HBsAg	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HCL MRD Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
HDL Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
≠ Hegzadion (2,5)	İdrar (Spot)	5 mL	GC-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Heinz-Body Aranması	Tam Kan	1 ml		Laboratuvara Danışın	
Helicobacter pylori direkt antijen	Gaita	5 g	İmmuno Kromatografik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Helicobacter pylori Ig A	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Helicobacter pylori Ig G	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Hemoglobin A1C (HbA1c)	EDTA'lı plazma	3 ml	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Hemoglobin elektroforezi	EDTA'lı plazma	3 ml	HPLC	Çarşamba (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Hemogram (Tam Kan sayımı)	EDTA'lı plazma	3 ml	Cell Counter	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
HIV 1 / HIV 2 Antikor	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
≠ Hidroksipirolin (serum)	İdrar	5 ml	LC-MS-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
High Sensitif CRP	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Hippürik asit	İdrar (Spot)	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
HLA-B27 (Monoklonal Antikor)	EDTA (Tam Kan)	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
HLA-DR (Monoklonal Antikor)	EDTA (Tam Kan)	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
HOMA-IR (İnsülin Direnci)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Homosistein	EDTA'lı plazma, Serum	3 ml	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Homovanilik asit (HVA)	İdrar, 24 saatlik İdrar (Asetik asit veya 6N HCl üzerine idrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır)	5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
HSV Tip 1 IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Ertesi gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
HSV Tip 1 IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
HSV Tip 2 IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
HSV Tip 2 IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Total Ig A	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Total Ig D	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Total Ig E	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Total Ig G	Serum, BOS, İdrar	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
≠ IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ IgG İndeksi	Serum ve BOS birlikte gönderilmesi gerekir	1 mL	Nefelometrik	Salı saat 13:00 (Saat 12.00'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
Ig M	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
İdrar kültürü ve koloni sayımı	İdrar (Spot)	5 mL	Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
İdrar tahlili	İdrar (Spot)	5 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ İdrar Total Glukozaminoglikan (GAG, Mukopolisakkarit tayini)	İdrar (Spot)	5 mL	Fotometrik	Perşembe saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra
İkili Tarama Testi (Birinci Trimester, Down sendromu) (PAPP-A + free beta HCG)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10:00
≠ İmmünelektroforezi Panel (İdrar)	24 Saatlik idrar	10 mL	Jel Elektroforez	Pazartesi -Perşembe (saat 10:00'dan	İki gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

			ve Nefelometrik	sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	18:00
İmmünelektroforezi Panel (serum)	Serum	1 mL	Jel Elektroforez ve Nefelometrik	Salı -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ İmmünelektroforez (İdrar)	24 Saatlik idrar	10 mL	Jel Elektroforez	Pazartesi -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
İmmünelektroforezi (serum)	Serum	1 mL	Jel Elektroforez- Kapiler Elektroforez	Salı -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ İmmünofiksasyon Elektroforezi (İdrar)	24 Saatlik idrar	10 mL	Jel Elektroforez	Pazartesi -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
İmmünofiksasyon Elektroforezi (Serum)	Serum	1 mL	Jel Elektroforez- Kapiler Elektroforez	Salı -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
İmmün Yetmezlik Paneli (CD4-CD8 Sayımı)	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
İndirekt Bilirubin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ İndirek Coombs	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	saat 18:00
İnfluenza (A+B) test	Üst solunum yolu örnekleri: Nazofaringeal swab (NF Sürüntü) ve Faringeal (Boğaz sürüntü) swab.		İmmuno Kromatografik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
İnhibin A	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
İnsülin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
İnsülin Like Growth Faktör Bağlayan Protein-3 (IGF BP3)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ İnterleukin 6	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ İntrinsik Faktör Antikoru (IF)	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra
İyonize Kalsiyum (Ca⁺²)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ İyot	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	Yirmi gün sonra
Kabakulak (mumps) IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Kabakulak (mumps) IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Pazartesi -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
≠ Kadmiyum	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
≠ Kadmiyum (Eritrosit İçi)	Heparinli Tam Kan	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
≠ Kalay	Serum, İdrar	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
Kalsitonin	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Kalsiyum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Kalsiyum (İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Kan Grubu	EDTA'lı plazma	3 mL	Tüp aglütinasyon	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Kan Kültürü	Kan	5 mL	Kültür	Hafta içi hergün	Üremeye göre yedi gün içerisinde saat 18:00
Kan üre azotu (BUN)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Kanda Alkol (Etanol)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Kappa Hafif Zincir (Total, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Kappa Hafif Zincir (Total, Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Kappa Hafif Zincir (Serbest, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Kappa Hafif Zincir (Serbest, Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Karbamazepin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Karnitin/Açilkarnitin Analizi (Tandem MS)	Filtre kâğıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire)		LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Sekiz gün sonra saat 18:00
Kızamık (Rubeola) IgG	Serum	1 mL	CLİA	Salı -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Kızamık (Rubeola) IgM	Serum	1 mL	CLİA	Salı -Perşembe (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Kist Hidatik (İndirekt hemaglutinasyon)	Serum	1 mL	IHA	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması	Klinik Örnek		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre on gün içerisinde
KLL MRD Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Klorür	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Klorür (İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	İSE	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Kobalt (Co)	Serum (Lacivert kapaklı tüp)	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün Sonra
≠ Koenzim Q10,	Serum	3 mL	LC-MS-MS	Çarşamba (12:00'den sonra kabul edilen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Cumartesi
Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Konjiktiva Kültürü			Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
Kompleman 3 (C3)	Serum	1 mL	Türbidimetrik İmmünotürbi dimetrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Kompleman 4 (C4)	Serum	1 mL	Türbidimetrik İmmünotürbi dimetrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Kortizol	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Kortizol, İdrar	Spot İdrar, 24 Saatlik İdrar (Borik Asit ile beraber)	2 mL 1 mL	LC-MS/MS	Çarşamba (salı gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	Cumartesi Saat: 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	gönderilmesi tavsiye edilir.)				
≠ Kortizol, Tükrük (Akşam)	Numune toplama öncesinde diş fırçalanmamalıdır. Tükrük arttırmak için sitrik asit içeren flakonlar kullanmamalıdır. Numune alımının 15 dk öncesinde bir şey yenmemeli veya içilmemelidir. Numune toplama işlemi saat 23:00 ile gece yarısı arasında yapılmalı ve toplama zamanı kaydedilmelidir. Sabah 8:00 (7:00-9:00-) ve öğleden sonra 16:00 (15:00-17:00) zamanlarına ait referans aralıklar bulunsa da örneklerin saat 23:00 ile gece yarısı arasında alınması tercih edilir.	1 mL	LC-MS/MS	Çarşamba (salı gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	Cumartesi Saat: 10:00
≠ Kortizol, Tükrük (Sabah)	Numune toplama öncesinde diş fırçalanmamalıdır. Tükrük arttırmak için sitrik asit içeren flakonlar kullanmamalıdır. Numune alımının 30 dk öncesinde bir şey yenmemeli veya içilmemelidir. Toplama zamanı kaydedilmelidir	1 mL	LC-MS/MS	Çarşamba (salı gününe kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	Cumartesi Saat: 10:00
Kreatinin	Serum, İdrar	1 mL 5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Kreatinin klerens testi	24 saatlik idrar (soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.)	5 mL 2 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	Serum aynı anda gönderilmeli.			sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Kriyofibrinojen	EDTA'lı plazma	3 mL	Presipitasyon	Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe	Dört iş günü sonra saat 18:00
Kriyoglobulin	Laboratuvara danışınız				
Kronik Lyme Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Kronik Myelomonositer Lösemi Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Krom	Tam Kan (EDTA) İdrar (Spot, 24 Saatlik)	2 mL 5mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	15 gün Sonra
≠ Kromogranin A	Serum	1 mL	EİA	Çarşamba (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 10:00
Kulak Akıntı Kültürü	Kulak Akıntısı		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Kurşun	Tam Kan (EDTA) İdrar (Spot, 24 Saatlik)	2 mL 5mL	ICP-MS, AAS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün Sonra
≠ Laktat (Laktik Asit)	Oxalatlı plazma Not: Numune sodyum florid / potasyum oksalatlı gri kapalı tüpe	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	alındıktan hemen sonra plazma hemoliz: edilmeden hemen ayrılmalıdır			kalır)	
Laktat Dehidrogenaz (LDH)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Laktoz Tolerans Testi	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠Lambda Hafif Zincir (Total, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Lambda Hafif Zincir (Total, Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Serbest, İdrar)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	5 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lambda Hafif Zincir (Serbest, Serum)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Lamotrigine	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya	On gün sonra saat 18.00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
LDL Kolesterol	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
LE Hücre	Serum	1 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün Sonra
≠ Legionella Antijeni (İdrar)	İdrar	5 mL	Elisa	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 10:00
≠ Legionella Pneumophila 1 IgG	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 10:00
≠ Legionella Pneumophila 1 IgM	Serum	1 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 10:00
Lenfoma (Lösemi) İmmünofenotip Analizi (16 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Lenfosit Alt Grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Lenfosit Alt Grupları (10	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat	Dört gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

adet monoklonal antikor sonucu verilir)				13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	sonra saat 10:00
Lenfoproliferatif Hastalık Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Levetracetam	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18.00
≠ LDL alt grupları (Lipoprint)	Serum veya EDTA plasma Sadece açlık (12 saat) örnekleri kullanılmalıdır. Antikoagülan olarak Heparin kullanılmamalıdır	3 mL	Elektroforez	Laboratuvara danışınız	
LH (Luteinizan Hormon)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Aynı gün saat: 18:00
Lipaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Lipoprotein a	Serum 8 -10 saatlik açlık gerektirir	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 12:00 (saat 10:00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Lipoprotein Elektroforezi	Serum	3 mL	Elektroforez	Laboratuvara danışınız	
Lityum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM Antikorları)	Serum	1 mL	İFA	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18.00
Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM Antikorları)	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Liver Profil (SLA, M2, LKM1, LC1)	Serum	1 mL	İFA	Perşembe saat 10:00 (Çarşamba'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Lupus Antikoagülan (Doğrulama)	Sitrat'lı Plazma Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayrılıp dondurulmalıdır.	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10.00
Lupus Antikoagülan (Tarama)	Sitrat'lı Plazma Sitratlı tüpe kan alındıktan sonra santrifüj edilmeli ve plazma kısmı ayrılıp dondurulmalıdır.	1 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 10.00
Magnezyum	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Magnezyum, Eritrosit içi	Heparinli Tam Kan	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 10.00
Makroprolaktin Taraması	Serum	1 mL	PEG çöktürme	Hafta içi hergün	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

			ECLIA	(Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	saat: 18:00
≠ Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	EİA	Hafta içi hergün (Saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Mandelik asit	İdrar (Spot)	5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Mangan (Ma)	Tam Kan (EDTA)	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
Mantar Aranması ve Kültür	Kültür örneği		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre üç gün içerisinde saat 18:00
Mastositöz Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik iliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) Kültürü	Semen, Sperm, Ejakulat	3 mL	Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üremeye göre üç gün içerisinde saat 18:00
≠ Metanefrin	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrarı	5 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	On beş gün sonra saat 10.00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.			numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Metanefrin	EDTA'lı Plazma Plazma fraksiyone metanefrinler testi için numune alınmadan en az 12 saat öncesinden başlamak üzere hasta, alkol ve sigara kullanmamalıdır. Kan örneği alırken; hasta en az 20 dakika yatar pozisyonda olmalı veya oturmalı ve rahat olmalıdır. Bir gecelik açlığı takiben sabah örnek alınması tavsiye edilir	3 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00
≠ Methanol (Metil alkol)	İdrar (Spot), Tam Kan (EDTA)	5 mL 3 mL	GC-MS	Hafta içi hergün	Yedi gün sonra saat 18:00
≠ Methemoglobin	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	EİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Metotreksat	Serum	1 mL	Tandem-CMIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Metil Hippürik Asit	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Metil malonik asit	Serum İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	On beş gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
Mikobakteri Kültürü	Balgam, trakeal aspirat, bronş lavaj ve diğer vücut sıvılarında		Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üreme yoksa 56 gün
Mikoplazma Hominis Kültürü	Sürüntü		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Mikoplazma Pneumoniae IgG	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Mikoplazma Pneumoniae IgM	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Mikroalbumin	İdrar (Spot-24 saat)	5 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Miyogloblin	Serum İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	CMİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Molibden (Mo)	Lacivert Kapaklı Tüp	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Mono Test (Heterofil Antikor)	Serum	1 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Monoklonal Antikorlar (CD Markerları)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Multiple Meloma-MGUS Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Mukopolisakkarit Tayini	İdrar (Spot)	5 mL	EİA	Perşembe (Çarşamba gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00
Myelodisplastik Hastalık Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Nazal Smear	Sürüntü		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ NCOV-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ NCOV-19 IgM (Kantitatif)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
NCOV-19 (Corona Virüs Tayini PCR)	Özel besiyeri		PCR	Salı-Perşembe Hafta içi hergün (Saat 13:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Nikel	Serum (Jelli Tüp) İdrar (Spot-24 saat)	1 mL 5 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
NK CELL (CD3/16+56)	EDTA'lı tam kan	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠NMP-22 (Nükleer Matriks Protein 22)	İdrar	5 mL	Strip	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrarı asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠ Noradrenalin (Norepinefrin),	EDTA'lı Plazma Plazma fraksiyone metanefrinler testi için numune alınmadan en az 12 saat öncesinden başlamak üzere hasta, alkol ve sigara kullanmamalıdır. Kan örneği alırken; hasta en az 20 dakika yatar pozisyonda olmalı veya oturmalı ve	2 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	rahat olmalıdır. Bir gecelik açlığı takiben sabah örnek alınması tavsiye edilir. Bu şartlar karşılanamadığı takdirde örnek alınır ve çalışıldıktan sonra not düşülerek raporlanır.				
≠ Normetanefrin, İdrar	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 saatlik idrar asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine toplanmalıdır.	5 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra saat 18:00
≠ Normetanefrin, Plazma	EDTA'lı Plazma Plazma fraksiyone metanefrinler testi için numune alınmadan en az 12 saat öncesinden başlamak üzere hasta, alkol ve sigara kullanmamalıdır. Kan örneği alırken; hasta en az 20 dakika yatar pozisyonda olmalı veya oturmalı ve rahat olmalıdır. Bir gecelik açlığı takiben sabah örnek alınması tavsiye edilir. Bu şartlar karşılanamadığı takdirde örnek alınır ve çalışıldıktan sonra not düşülerek raporlanır.	2 mL	LC-MS/MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00
≠ Nöron spesifik enolaz (NSE)	Serum (Plazma kabul edilmemektedir) Kan 1 saat içerisinde santrifüj edilmelidir	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
OGTT (100gr) 60-120-180 Dk.*	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
OGTT (50gr) 60dk.*	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ O-Krizol	İdrar (Spot)	5 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş gün sonra
≠ Oksalat	İdrar (Spot, 24 Saatlik) 24 Saatlik İdrarı 30 mL 6 N HCl üzerine toplayın. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Sekiz gün sonra saat 18:00
Oksiyur Yumurtası Araştırılması	Laboratuvara danışınız				
≠ Oligoklonal bant (BOS İmmunelektroforez)	Serum ve BOS numuneleri aynı hafta içerisinde alınmış olmalıdır. BOS numunelerinin LP işlemi sırasında kan ile kontaminasyonun un sonuçları önemli ölçüde etkileyeceği akılda tutulmalıdır	Serum ve BOS 3 mL	Elektroforez	Salı saat 13:00 (Saat 12.00 den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır	On beş gün sonra
≠ Oraklaşma testi	EDTA'lı tam kan	3 mL	Mikroskopik	Pazartesi- Perşembe saat 12:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya	İki gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
≠ Organik Asit Analizi (İdrarda)	İdrar (Spot)	10 mL	GC-MS	Pazartesi, Cuma (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra saat 18:00
≠ Osteokalsin	Serum	1 mL	ECLİA	Pazartesi, (Cumartesi 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Oxcarbazepin ve aktif metabolitleri (Trileptal)	Serum	1 mL	LC-MS/MS	Salı, Perşembe saat 12:00 (Pazartesi ve çarşamba günlerinden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
Ozmalarite (İdrar)	İdrar	5 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Ozmalarite (Serum)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (saat 15:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Ozmatik Frajilite	EDTA'lı tam kan	3 mL	EİA	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ P1NP (Prokollajen I tip, N terminal)	Serum	1 mL	ECLİA	Pazartesi (Cumartesi saat: 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat 18:00
p-ANCA (Anti-MPO)	Serum	1 mL	ELİSA	Perşembe (Saat 10.00 dan sonra gelen numuneler bir	İki gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Pankreatik amilaz	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠Pankreatik Elastaz	Gaita Bebeklerden gaita numunesi alınırken bezin üzerine muşamba, naylon v.b. emici olmayan bir örtü örtülmesi veya hazır bezlerin sırt kısmının kullanılması gerekmektedir. Bebek dışısını yapar yapmaz numune ağzı kapaklı ve sızdırmaz bir kap içerisine alınmalıdır.		EİA	Salı, Cuma (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
PAPP-A	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Parvovirus B19 IgG	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Parvovirus B19 IgM	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Periferik Yayma İncelemesi	EDTA'lı tam kan	3 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
Pıhtılaşma Zamanı	Sitratlı Plazma Numune vermek için hasta laboratuvara gelmelidir.	1 mL		Hafta içi hergün	Aynı gün saat 18:00
≠ Piridinolin	İdrar (Spot- 24 Saatlik)	5 mL	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Piruvat	EDTA'lı Tam Kan, BOS Not :1- İlk önce 2 mL %8 lik perklorik asiti santrifüj tüpüne (sekonder tüp vs) ekleyiniz.2- 2 mL %8lik perklorik asit koyulan santrifüj tüpünün üzerine 1 Ml heparinli tam kan ekleyerek, 30 saniye vorteksleyiniz.3- Tam protein çökelmesini sağlamak için karışımı +4 C de 10 dakika soğuk tutunuz.4- Karışımı 15 dakika *3000 g de santrifüj ediniz.5- Santrifüj sonrası süpernatantı (berrak kısmı) ayırınız.6- Ayrılan süpernatanta 50 uL 5 M NaOH ekleyiniz7- Hazırlanan süpernatantı soğuk zincirde saklayınız	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Piruvat kinaz	EDTA'lı tam kan	3 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Plazma Renin Aktivitesi	Plazma (EDTA) 4 saat içerisinde laboratuvarımızda olamayacak numuneler en az -20'C'de dondurulmalı ve transferleri iki buz aküsü arasına koyularak yapılmalıdır.	3 mL	CLIA	Pazartesi, Çarşamba, Cuma	Dört gün sonra saat 18:00
≠ Plasmodium aranması	Kalın ve ince yayma preparatları		Kalın damlası-Periferik yayma	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Plazminojen	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Porfirin	İdrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir. 24 saatlik numune gönderimi	5 mL	HPLC	Çarşamba saat 13:00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi Saat 18.00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	yaparken; toplama başlangıcında koruyucu olarak 5 g sodyum karbonat ekleyin.				
≠ Porfobilinojen	İdrar Karanlık ve soğuk ortamda toplanmalı ve gönderilmelidir.	5 mL	EİA	Çarşamba saat 13:00 (Salı gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi Saat 18.00
≠ Post prandial kan şekeri (Tokluk Kan Şekeri)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Potasyum	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Prealbumin	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Primidone	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Pro-BNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Progesteron	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
Prokalsitonin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prolaktin	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prostat Spesifik antijen (Total PSA)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Prostat Spesifik antijen (Serbest PSA)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Prostatik asit fosfataz (PAP)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat: 18:00
≠ Protein C aktivite	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Protein C antijen	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Protein elektroforezi	Spot idrar	10	Elektroforez	Cuma (Saat 10:00 'a	İki gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

(İdrar)		mL		kadar gelen numuneler çalışmaya alınır)	sonra saat 18:00
Protein elektroforezi (serum)	Serum	1 mL	Elektroforez	Salı, Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Protein S aktivite	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Protein S antijen	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Protrombin zamanı (PTZ)	Sitratlı plazma	2 mL	Koagülometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Pseudokolin esterase	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
PTH (Parathormon)	Plasma (EDTA)	1 mL	ECLIA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Quantiferon-TB Gold (Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer ile)	Plazma (EDTA).	1 mL		Cuma saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya	Pazartesi saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
Redüktan madde (gaita)	Gaita	5 g	Kimyasal	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Redüktan madde (idrar)	Spot idrar	10 mL	Kimyasal	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yedi gün sonra saat 18:00
Retikülosit	EDTA'lı plazma	3 mL	Manuel	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Reverse T3	Serum	1 mL	EİA	Cuma (Perşembe saat 10:00 'a kadar gelen numuneler kabul edilir)	Dört gün sonra saat 18:00
≠ Retinol Binding Protein (RBP)	Serum	1 mL	Nefelometrik	Salı saat 13:00 (Pazartesi Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat: 18:00
Ribosomal P-Protein (RIB)	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Ribosomal P-Protein (RIB)	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Ro 52	Serum	1 mL	ELİSA	Salı ve Perşembe (Çalışma Günlerinden bir gün önce 14:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	Üç gün sonra saat 10:00
Ro 52	Serum	1 mL	İmmunblot	Perşembe (Çalışma Gününden bir gün	Üç gün sonra saat

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				önce 17:00'a kadar numuneler ulaştırılmalı)	10:00
Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Rotavirüs antijeni (Gaita)	Gaita	5 g	İmmuno Kromatografik	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) eğer numuneler inkübe edilmeden gönderilirse testin çalışılması bir sonraki çalışma gününe kalır	Ertesi gün saat 18:00
RSV DFA (Solunum sinsityal virusu)	Üst solunum yolu örnekleri: Nazofaringeal swab (NF Sürüntü) ve Faringeal (Boğaz sürüntü) swab.			Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır) eğer numuneler inkübe edilmeden gönderilirse testin çalışılması bir sonraki çalışma gününe kalır	Ertesi gün saat 18:00
≠ RSV IgG	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ RSV IgM	Serum	1 mL	EİA	Salı saat 13:00 (Pazartesi gününden sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Rubella IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Rubella IgG avidite	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi (Saat 10:00 'a kadar gelen numuneler kabul edilir)	İki gün sonra saat 18:00
Rubella IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Saçlı Deride Mantar Aranması	Saçlı deri kazıntısı		Mikroskopik	Hafta içi hergün	On gün içerisinde saat 18:00
Saçta Mantar Aranması	Saç teli		Mikroskopik	Hafta içi hergün	On gün içerisinde saat 18:00
Safra Asitleri	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
Sedimentasyon (1 saat)	Sitratlı Kan		Kapalı sistem	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Selenyum	Serum, İdrar	3 mL	ICP-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Selofan Bant (Oksiyur Yumurtası Aranması)	laboratuvara danışınız				
≠ Serbest Kortizol	İdrar	5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
≠ Serotonin	Serum, Tam Kan, EDTA'lı Plazma 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir	3 mL	HPLC	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
≠ Serotonin	İdrar (Spot, 24 saat) (%50 Asetik asit üzerine İdrar toplanmalıdır ve soğukta saklanmalıdır) Hastalar, toplamadan önce ya da 48 saat boyunca avokado, muz, butternut, kavun, hurma, patlıcan, greyfurt, hıyar fındık, ballı karpuz, kivi, kavun, fındık, ceviz, ananas, antep fıstığı, erik, domates veya ceviz yememelidir.	5 mL	ICP-MS	Pazartesi, Perşembe (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
Seruloplazmin	Serum	1 mL	Türbidimetrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Serviks Sürüntü Kültürü	Kültür Materyali		Kültür	Hafta içi hergün	Üç Gün Sonra
Sezary Sendromu-Micozis Fungoides Paneli	EDTA'lı tam kan Kemik iliği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Siklosporin A	EDTA'lı tam kan	3 mL	LC-MS-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On iş günü sonra saat 18:00
≠ Sirolimus (Rapamune)	EDTA'lı tam kan	3 mL	LC-MS-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On iş günü sonra saat 18:00
≠ Sistatin C	Serum	1 mL	Nefelometrik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Sistin	İdrar (Spot- 24 Saatlik), Serum Not: 24 saatlik idrar numunesi toplamadan önce idrar toplama kabına 30 ml tolüen ilave edilmelidir.	5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
≠ Sitrat (Sitrik Asit)	İdrar (Spot- 24 Saatlik)	5 mL	LC-MS-MS	Hafta içi her gün (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
Sodyum	Serum	1 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya	Aynı gün saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				kalır)	
Sodyum (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	3 mL	İSE	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
≠ Soğuk aglütininer	Serum + Tam Kan (3 ml)	3 mL	Aglütinasyon	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
Soluble Liver Antigen (SLA)	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç iş günü sonra saat 18:00
≠ Solunum yolu patojen paneli	Üst solunum yolu örnekleri (Nazofaringeal swab, Faringeal swab, Bronkoalveoler lavaj (BAL), Minimum hacim 1 mL viral taşıma ortamında (VTM))		PCR	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Somatomedin C (IGF-1)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün saat 18:00
Sperm morfolojisi (Kruger)	Taze semen (30 dakika içinde getirilmelidir)		Mikroskopik (özel boyama ile)	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra
Spermiyogram	Taze semen		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat	Aynı gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	(30 dakika içinde getirilmelidir)			13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	saat 18:00
Spesifik IgE C1 (Penisilol G)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE C2 (Penisilol V)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE C203 (Ampisillin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE C204 (Amoksisillin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE E1 (Kedi epiteli ve kılı)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Spesifik IgE DP1 MİTE (Akar) Karışımı -D1 Dermatophagoides p. -D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor -D72 Tyrophagus putrescentiae -D73 Glycyphagus domesticus -D74 Euroglyphus maynei -D201 Blomia tropicalis-D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE E5, Köpek Tüyü	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE EP1 Hayvan Tüyleri Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E3 At Tüyü - E4 İnek Tüyü - E5 Köpek Tüyü	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE EP2 Hayvan Tüyleri Karışımı - E1 Kedi Tüyü-Epiteli - E5 Köpek Tüyü - E6 Hint Domuzu Tüyü - E87 Sıçan Tüyü - E88 Fare Tüyü	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE EP71 Hayvan Tüyleri Karışımı -E70 Kaz Tüyü -E85 Tavuk Tüyü -E86 Ördek Tüyü -E89 Hindi Tüyü	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE EP72 Hayvan Tüyleri Karışımı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- E78 Muhabbet kuşu Tüyü - E213 Papağan Tüyü - E201 Kanarya Tüyü - E214 İspinoz Tüyü				10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Spesifik IgE F10 Susam	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F1 Yumurta Akı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F75 Yumurta sarısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F247 Bal	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F105 Çikolata	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F11 Karabuğday	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F309 Nohut	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE F315 Taze Fasulye	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F13 Yerfıstığı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F93 Kakao	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F14 Soya Fasulyesi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F17 Fındık	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F20 Badem	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F253 Çam Fıstığı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Spesifik IgE F256 Ceviz	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F2 İnek sütü	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F204 Ala Balık	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F233 Ovomucoid	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F25 Domates	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F244 Salatalık	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F47 Sarımsak	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F27 Sığır eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Spesifik IgE F35 Patates	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F4 Buğday	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F409 Keçi sütü	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F360 Yoğurt	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F41 Somon	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F44 Çilek	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F242 Kiraz	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE F33- Portakal	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F84 Kivi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F92 Muz	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F95 Şeftali	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F45 Baker's Yeast (ekmek mayası)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F4 Buğday Unu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F5 Çavdar Unu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Spesifik IgE F76 Alfa laktalbümin	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F77 Beta laktoglobülin	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F78 Kazein	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F79 Gluten	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F8 Mısır	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F83 Tavuk eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE F26 Domuz Eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F27 Kırmızı Et	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE F88- Koyun Eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE FP7 Beslenme Tarama - F1 Yumurta Akı - F2 Süt - F4 Buğday - F9 Pirinç - F13 Yerfıstığı - F14 Soya fasulyesi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE FP1 Kuruyemiş Karışımı - F13 Yerfıstığı - F17 Fındık - F18 Brezilya Fındığı - F20 Badem - F36 Hindistan Cevizi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE FP13 Sebze Gıda Karışımı - F12 Yeşil Bezelye - F15 Beyaz Fasulye - F31 Havuç - F35 Patates	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE FP15 Meyve Karışımı - F33 Portakal - F49 Elma - F92 Muz - F95 Seftali	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP2- Balık Paneli - F3 MorinaBalığı - F24 Karides - F37 Kara Kabuk Midyesi - F40 TonBalığı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- F41 Somon					
Spesifik IgE FP3 Hububat Karışımı - F4 Buğday - F7 Yulaf - F8 Mısır - F10 Susam tohumu - F11 Karabuğday	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE F9 Pirinç	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE FP73 Gıda Et Paneli - F26 Domuz Eti - F27 Sığır Eti - F83 Tavuk Eti - F88 Koyun Eti	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı - G3 Meyve Otu - G4 Çayır Otu - G5 Delice Otu - G6 Timoti Otu - G8 Çayır Salkım Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı -G2 Domuz ayrığı Otu -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G8 Çayır Salkım Otu -G10 Darı Otu -G17 Bahia Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE GP3 Çimen paneli -G1 Kokulu Yonca -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G12 Çavdar -G13 Kadife Çimi	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Spesifik IgE HP1 Toz Karışımı - D1 Dermatophagoides p. - D2 Dermatophagoides farinae - H1 Ev Tozu - I6 Hamam Böceği	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE IP8 Solunum Tarama - D1 Dermatophagoides p. - E1 Kedi Tüyü- Epiteli - E5 Köpek Tüyü - G6 Timoti Otu - G12 Çavdar - M2 Cladosporium herbarum - T3 Hus Ağacı - W6 Mist Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE H2 Ev Tozu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE I1 Bal Arısı zehri	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE I2 Eşekarısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE I3 Yaban Arısı zehri	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE I4 Sarıca Arı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE I5 Sarı Eşekarısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IGE I77 Avrupa Kâğıt Yaban arısı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE I6 Hamam böceği	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE I71 sivrisinek	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE İnhalant Paneli – 8 - D1 dermatophagoides pteronyssinus - E1 Kedi Tüyü-epiteli - E5 Köpek Tüyü - G6 Timoti otu - G12 Çavdar - M2 Cladosporium herbarum - T3 Hus ağacı - W6 mist otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE K82 Latex	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE Küf Paneli – 1	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

- M1 <i>Penicillium notatum</i> - M2 <i>Cladosporium herbarum</i> -M3 <i>Aspergillus fumigatus</i> - M5 <i>Candida albicans</i> - M6 <i>Alternaria tenuis</i>				10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE M1 <i>Penicillium notatum</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M207 <i>Aspergillus niger</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE M3 <i>Aspergillus fumigatus</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE M5 <i>Candida albicans</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE M2 <i>Cladosporium herbarum</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE M6 <i>Alternaria Alternaria(A. Tenuis)</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE W6 <i>Mugwort (Mist otu)</i>	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Spesifik IgE P1- Ascaris	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE MP1 Küf Karışımı - M1 Penicillium notatum - M2 Cladosporium herbarum - M3 Aspergillus fumigatus - M5 Candida albicans - M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE Toz Paneli - 1 - D1 dermatophagoides pteronyssinus - H1 Ev Tozu - D2 dermatophagoides farinae - I6 Hamam böceği	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE WP1 Yabani Ot Karışımı - W1 Kanarya Otu - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W11 Rus Deve Dikeni Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE WP3 Yabani Ot Karışımı - W6 Mist Otu - W9 Dar yapraklı sinir Otu - W10 Ak kaz ayağı Otu - W12 Altın basak Otu - W20 Isırgan Otu	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T3 Hus Ağacı - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T10 Ceviz Ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T3 Hus Ağacı - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T10 Ceviz Ağacı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE TP2 Ağaç Karışımı - T1 Akçaağaç - T7 Mese Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T14 Kavak - T22 Alıç	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE T11 Çınar ağacı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE TP5 Ağaç Karışımı - T2 Kızıl Ağaç - T4 Fındık Ağacı - T8 Karaağaç Ağacı - T12 Söğüt Ağacı - T14 Kavak Ağacı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Spesifik IgE TP7 Ağaç Karışımı - T9 Zeytin Ağacı - T12 Söğüt Ağacı - T16 Beyaz Çam Ağacı - T18 Ökalyptus Ağacı - T19 Akasya Ağacı - T21 Melaluka Ağacı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
≠ Spesifik IgE T14 Kavak	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	saat: 18:00
Spesifik IgE T9 Zeytin ağacı	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
SS-A (Anti Ro) Antikoru	Serum	1 mL	Immunblot - EIA	Cuma (Perşembe 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
SS-B (Anti -La) Antikoru	Serum	1 mL	Immunblot - EIA	Cuma (Perşembe 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
SS-A (Anti Ro) Antikoru	Serum	1 mL	ELISA	Cuma (Cuma 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
SS-B (Anti -La) Antikoru	Serum	1 mL	ELISA	Cuma (Cuma 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat 18:00
Sürüntü Kültürü	Kültür Materyali			Hafta içi hergün (Saat 15.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra
≠ Şeker kromatografisi (İdrar)	İdrar, Gaita	2 mL	RIA	Hafta içi hergün	Bir hafta sonra saat: 18:00
T-ALL MRD Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik İliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir	Dört gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik iliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
T hücreli Lenfoproliferatif Hastalık Paneli	EDTA'lı Tam Kan Kemik iliği		Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
≠ Takrolimus (FK 506)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Talyum	İdrar (Spot, 24 Saatlik), Tam Kan (Heparinli,)	3 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün	Yirmi gün sonra
Tam İdrar Analizi	İdrar	3 mL	Mikroskopik	Hafta içi hergün	Aynı gün 18:00
≠TBG (Tiroksin Bağlayıcı Globulin)	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
TCA (Trikloro Asetik asit)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	3 mL	Spektrofotometrik	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
TCE (Trikloroetilen)	İdrar (Spot, 24 Saatlik)	3 mL	Spektrofotometrik	Hafta içi hergün	On beş gün sonra
≠ Teofilin	Serum	1 mL	CLIA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Testosteron (serbest)	Serum	1 mL	ELİSA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi gün saat: 18:00
Testosteron (Total)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Tetanoz antikor	Serum	1 mL	EIA	Salı saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Tırnakta mantar Aranması	Tırnak		Mikroskopik	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
Tiroglobulin (Tg)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Tiroid Stimule Edici Immunglobulin (TSI)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Tiroksin bağlayan globulin (TBG)	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat. 18:00
≠ Titanyum	Serum (Lacivert kapaklı tüp)	1 mL	ICP-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra saat 18:00
≠ Toluen	İdrar	2 mL	HPLC	Hafta içi hergün saat	On beş gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	sonra Saat 18:00
≠ Topiramet	Serum	3mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Örnek kabulü, salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 10:00, perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 10:00)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Total antioksidan aktivite	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Total oksidan aktivite	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün saat 15:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Total Protein	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Total Protein (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Toksoplazma IgG	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Toksoplazma IgG Avidite Testi	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat. 18:00
Toksoplazma IgM	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Total T3	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Total T4	Serum	1 mL	CLİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Transferrin	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Transferrin Satürasyonu	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Trepanoma Pallidum Hemaglutinasyon (TPHA)	Serum	1 mL	CMİA	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat. 18:00
Trichomonas Aranması	Kadın: vaginal smear, servikal		Mikroskopik	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat	Ertesi Gün Saat: 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

	smear, uretral smear, idrar			10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠Trichomonas Vaginalis DNA**	Kadın: vaginal smear, servikal smear, uretral smear, idrar Erkek: üretral sekresyon, prostat sıvısı, idrar		Real-time PCR	Salı Saat 12.00 (Saat 09:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	İki gün sonra saat. 18:00
Trigliserid	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Triptaz	Serum	1 mL	FEİA	15 günde bir Cumartesi çalışılır	İki gün sonra saat. 18:00
≠ Trombin zamanı	Sitratlı Plazma	1 mL	Koagülometrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki gün sonra saat 18:00
≠ Trombosit fonksiyon agregasyon testleri (kollajen, ADP, epinefrin, ristosetin olarak 4 ayrı test çalışılır)	Laboratuvara danışınız.			Laboratuvara danışınız	Ertesi Gün Saat: 18:00
Trombosit Paneli	EDTA'lı tam kan Kemik iliği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00
Troponin I	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Aynı gün 18:00
TSH (Tiroid Stimülan Hormon)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir	Aynı gün 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
TSH Reseptör Antikoru	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ t-t Mukonik asit	laboratuvara danışınız				
UIBC (Serbest Demir Bağlama Kapasitesi)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Ureaplasma Urealitikum Kültürü	Servikal, Üretral Swab, ön İdrar, semen		Kültür	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 18:00
Uyuşturucu Paneli (Amfetaminler, kokain, marjuana, benzodiazepin, ecstasy, trydydic, antidepresanlar, barbitürat, metamfetamin, morfin, metadon)	İdrar	5 mL	Strip	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Ertesi Gün Saat: 18:00
Üçlü Tarama Testi (İkinci Trimester Tarama Testi)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Üre (BUN)	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Üre (İdrar)	Spot İdrar, 24 saatlik İdrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen	Aynı gün 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Üretral Akıntı Kültürü	Üretral akıntı		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Ürik Asit	Serum	1 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Ürik Asit (İdrar)	Spot idrar, 24 saatlik idrar	4 mL	Fotometrik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
Vajinal Kültür	Vajinal -servikal swab		Kültür	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç gün sonra saat 18:00
Valproik Asit (Depakin)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün	Ertesi Gün Saat: 18:00
≠ Vanil mandelik asit (VMA)	Spot idrar, 24 saatlik idrar	3 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş iş günü sonra saat 18:00
≠Vankomisin	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, Perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	Üç gün sonra saat 18:00
Varicella zoster virus	Serum	1 mL	ELİSA	Çalışma günleri; Salı	Ertesi gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

(VZV) Ig G				ve Perşembe (Salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, Perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	saat 18:00
Varicella zoster virus (VZV) Ig M	Serum	1 mL	ELİSA	Çalışma günleri; Salı ve Perşembe (Salı günü çalışılacak olan örnekler için Pazartesi 12:00, Perşembe günü çalışılacak örnekler için Çarşamba 12:00)	Ertesi gün saat 18:00
VDRL Kart Test (RPR)	Serum	1 mL	İmmuno Kromatografik	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Vitamin A (Retinol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠ Vitamin B1 (Tiamin)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
Vitamin B12 (Siyanokobalamin)	Serum	1 mL	ECLİA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Aynı gün 18:00
≠ Vitamin B2 (Riboflavin)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Vitamin B6 (Pridoksal fosfat)	EDTA'lı Tam Kan	3 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠ Vitamin B7 (Biotin-H Vitamini)	Serum	1 mL	EİA	Pazartesi, Çarşamba ve Cuma (Çalışma gününden bir gün önce saat:10'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
≠ Vitamin C (Askorbik asit)	Heparinli Plazma, (Çöktürülmüş plazma; %10'luk methafosforik asit 1:1 oranında ilave edilir santrifüj edilip üst faz alınır dondurularak gönderilir- 1 mL (min 0.5 mL)	3 mL	HPLC	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠ Vitamin E (Alfa-tokoferol)	Serum	1 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠VMA (Vanil Mandelik Asit)	İdrar	3 mL	LC-MS-MS	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On gün sonra saat 18:00
≠ Von Willebrand faktör aktivitesi (Ristosetin Kofaktör)	Sitratlı Plazma	2 mL	Koagülo-metrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	İki iş günü sonra saat 18:00
≠ Von Willebrand faktör antijeni	Sitratlı Plazma	2 mL	Koagülo-metrik	Perşembe saat 13:00 (Saat 10:00'dan sonra gelen	İki iş günü sonra saat 18:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
Yara Kültürü	Kültür Materyali		Kültür	Hafta içi hergün	Üç gün sonra saat 18:00
≠ Yenidoğan Taraması (Tandem MS)	Filtre kâğıdı kartında 3 dolu daire (min 1 daire) Erken teşhisin faydasını en üst düzeye çıkarmak için, örnek 12 saatten sonra ve 1 haftalıktan önce mümkün olduğunca erken toplanmalıdır		LC-MS-MS	Hafta içi hergün	Yedi gün sonra saat 18:00
ZAP70 Paneli	EDTA'lı tam kan Kemik İliği	3 mL	Flow Sitometri	Hafta içi hergün saat 13:00 (saat 10:00' dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Dört gün sonra saat 10:00

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

GENETİK TESTLER					
Test Adı	Numune Türü ve Miktarı		Metot	Çalışma Günleri	Rapor Tarihi
≠ Adenovirus DNA PCR (Kantitatif)	Vücut sıvısı- Serum		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On dört gün sonra
≠ Alfa Talasemi (HBA1, HBA2 ve HBZ genleri) (Delesyon Analizi- MLPA)	Edtalı tam kan		MLPA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ AML Sitogenetik-FISH- Moleküler Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün Çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi	Amniyon sıvısı		Kromozom analizi/ Karyotype analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra
Amniyon Sıvısı Kromozom Analizi + Hızlı Fish (13,18,21, X,Y) Paneli	Amniyon sıvısı		Kromozom analizi/ Karyotype analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi gün sonra
≠ Beta Talasemi (HBB geni) (Tüm Gen- Dizi Analizi)	Edtalı tam kan		Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ BRCA1 Gen Mutasyonu	Edtali tam kan		MLPA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra
≠ BRCA2 Gen Mutasyonu	Edtali tam kan		MLPA	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ Chlamydia Real Time PCR	İdrar, Endoserviks veya erkek uretrasından elde edilen swab örnekleri		PCR	Salı günü (Pazartesi'den sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Perşembe
≠ Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli (Üretrit Panel) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex Tip1(HSV1), Herpes simplex Tip2(HSV2), Treponema pallidum, Lymphogranuloma venereum	Ön idrar; Üretral/Vajinal Sürüntü (Kuru veya serum fizyolojik eklenmiş steril swap) En az 2 saat mesanede beklemiş 10mL idrar(ön idrar ile birlikte)		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Üç Gün sonra
≠ CMV DNA	Serum, İdrar, Edtali Tam Kan		PCR	Perşembe (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi
≠ Düşük Materyalinden Kromozom Analizi	Düşük Materyali		HRB	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen	On beş gün

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	
≠ EBV DNA PCR Kantitatif	EDTA'lı plazma (tercih edilir), Serum, Diğer: Vücut sıvıları - 1 mL (min 0.5 mL		PCR	Çarşamba (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cuma
≠ Faktör 5 1299 (Cambridge) / Faktör 5 Leiden)	Edta'lı Kan		Dizi Analizi/ Sequence Analysis	Salı- Perşembe- Cumartesi	Otuz Gün sonra
≠ FISH-KML Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-MDS Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-ALL Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-AML Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-AML – MDS Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-KLL Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-MPN Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği- P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FISH-Multiple Myeloma Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği-P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ FISH-NHL (Non Hodgkin Lymphoma) Paneli	Heparin'li Kan (Kemik iliği-P.Kan)		FISH	Hergün çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ FMF-MEFV Hedef Mutasyon Analiz (12 Mutasyon)	Edta'lı Kan		MLPA (CNV)	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ FMF-MEFV Hedef Mutasyon Analiz (Tüm Gen)	Edta'lı Kan		Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra
≠ Glikojen Depo Hastalıkları Paneli (16-40 Gen)	Edta'lı Kan (Periferik Kan)		-	Hergün çalışılır	Kırk beş Gün sonra
HBV DNA (PCR)	Serum, EDTA'lı Tam Kan		PCR	Çarşamba 12.00 (Saat 9.00 dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır.)	Cuma saat 10:00
HCV RNA (PCR)	Serum, EDTA'lı Tam Kan		PCR	Cuma (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Salı saat 10:00
≠ HDV RNA (PCR)	Serum		PCR	Perşembe (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi
≠ HIV1 RNA	Serum		PCR	Cuma (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Pazartesi

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ HLA B5 (51, 52)	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
HLA B27	Edtalı tam kan		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Beş Gün sonra
≠ HLA Tipleme PGT (Haplotip ve Marker Analizleri- Lösemi vb)	Embriyo		CGH	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ HSV TİP 1-2 DNA	Serum-BOS		PCR	Çarşamba (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi
Human Papilloma Virus (HPV) Tespit ve Tiplendirme (20TİP)	Vajinal sürüntü / lezyondan biyopsi		PCR	Pazartesi (Cumartesi 10:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Çarşamba günü saat 15:00
≠ JAK 2 V617 F Kantitatif	Edtalı tam kan		Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra sonra
≠ Kistik Fibrozis CFTR Hedef Mutasyon Analizi (tüm gen)	Edtalı tam kan		MLPA (CNV)	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir	Yirmi Gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Koryonik Villus Örneğinden (CVS) Kromozom Analizi (Panel)	Merkezimizden temin edilen transport besi yeri içinde		Kromozom analizi/ Karyotype analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün sonra
≠ MPN Moleküler+FISH Paneli	Heparin'li Kan (Kemik İliği-P.Kan)		FISH	Hergün Çalışılır	Yirmi beş Gün sonra
≠ Mycoplasma Hominis	Vajinal sürüntü/ İdrar/ Lezyondan Biyopsi		PCR	Salı- Perşembe- Cumartesi	On beş Gün sonra
≠ Myeloid NGS Paneli (41 gen ve üzeri)	Edta'lı Kan (Periferik Kan)		Yeni Nesil Dizileme	Hergün Çalışılır	Yirmi beş Gün
≠ MTHFR Mutasyon Analizi (A1298C ve C677T)	Edtalı tam kan		Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra
≠ NIPT (Non İnvazyi Prenatal Test) Gebelik Tarama Testi	Özel Tüpleri Laboratuvara Danışınız				Laboratuvara Danışınız
≠ Orak Hücre Anemisi HBB	Edtalı tam kan		Tüm Gen Dizi Analizi/ Sequence Analysis-All Coding Exons	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra
≠ PAI 14G/5G Polimorfizmi	EDTA'lı tüp (mor kapaklı tüp)		RT-PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

≠ Parvovirüs B19 DNA	Vajinal sürüntü/ İdrar/ Lezyondan Biyopsi /Serum		PCR	Perşembe (Saat 9:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Cumartesi
≠ Periferik Kandan Kromozom Analizi	Heparinli, Yeşil Kapak		Kromozom analizi/ Karyotype analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ Prenatal Tanı (Rapid FISH) Amniyon (13,18,21, X, Y)	Amniyon sıvısı,kord kanından,koryon villus biyopsisi, fetal kan materyalinden		Direkt Hücre	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On Gün sonra
≠ Protrombin (G20210A) Mutasyon Analizi	Edtalı tam kan		Dizi Analizi/ Sequence Analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ Sperm DNA Fragmentasyon	Sperm (Transport besi yeri içinde)		TUNEL	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün sonra
≠ Toksoplazma DNA	EDTA'lı Tam Kan, Serum, Amniyon Sıvısı		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	On beş Gün sonra
≠ TORCH Paneli (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV)	EDTA'lı Tam Kan,		PCR	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir	On Gün sonra

SENSBIO TEST KATALOŽU

Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

				sonraki çalışmaya kalır)	
≠ Trombofili Paneli (7'li panel)	EDTA'lı Tam Kan,		Dizi Analizi/ Sequence Analysis	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Yirmi Gün sonra
≠ Tüm Exom(Gen) Analizi	EDTA'lı Tam Kan,		Ekzom/ Exome	Hafta içi hergün (Saat 15:00'dan sonra gelen numuneler bir sonraki çalışmaya kalır)	Otuz Gün sonra

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

FLOW SİTOMETRİ TESTLERİ VE ANTİKORLAR

<u>Akut Miyeloid Lösemi Paneli</u>	CD15, CD2, CD13, CD123, CD36, CD38, CD45, MPO, CD33, CD117, CD11b, CD14, CD16, CD 5, CD56, CD19, CD34, CD13, CD7, CD10, HLADR, CD38, CD45
<u>B hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Paneli</u>	CD58, CD81, CD19, CD34, CD13, cyt CD79a, CD10, CD38, CD20, CD45, Tdt, cyt IgM, CD22, Lambda, Kappa, CD 5, CD56, CD19, CD34, CD13, CD7, CD10, HLADR, CD38, CD45
<u>T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Paneli</u>	TCRgd, TDT, CD1a, CD4, CD5, CD8, TCRab, CD2, cytCD3, CD3, CD45, CD 5, CD56, CD19, CD34, CD13, CD7, CD10, HLADR, CD38, CD45
<u>Lenfoproliferatif Hastalık Paneli</u>	CD43, ROR1, CD19, CD79b, CD20, CD23, CD5, CD38, CD81, CD103, CD11c, CD22, Lambda, Kappa, CD10, CD200, CD3, CD25, CD45
<u>T hücreli Lenfoproliferatif Hastalık Paneli</u>	TCRgd, CD26, CD4, CD5, CD8, TCRab, CD2, HLADR, CD3, CD45, CD57, CD56, CD1a, CD30, CD10, cytCD3
<u>Myelodisplastik Hastalık Paneli</u>	CD11b, CD56, CD117, CD34, CD13, CD14, CD10, CD16, CD19, CD45, CD71, CD105, CD7, CD235a, CD36, CD64, HLADR, MPO, CD25, CD33, CD123, CD38
<u>B ALL MRD Paneli</u>	CD66c, CD73, CD19, CD34, CD20, CD123, CD10, CD38, CD81, CD45
<u>B ALL MRD Paneli (Bilatumab tdv)</u>	CD66b, CD22, CD34, CD24, CD10, CD38, CD20, CD45
<u>KLL MRD Paneli</u>	CD43, ROR1, CD19, CD79b, CD20, CD5, CD3, CD81
<u>T-ALL MRD Paneli</u>	CD16, CD56, CD48, CD7, CD8, CD99, CD5, CD4, CD3, CD45
<u>AML MRD Paneli</u>	CD11b, CD33, CD117, CD34, CD13, CD7, CD56, HLADR, CD19, CD45, CD15, CD14, CD19, CD64

	SENSBIO TEST KATALOĞU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

<u>HCL MRD Paneli</u>	CD103, CD10, CD19, CD22, LAMBDA, KAPPA, CD11c, CD25, CD20, CD45
<u>Multiple Meloma-MGUS Paneli</u>	CD28, CD27, CD19, CD138, cytLAMBDA, cytKAPPA, CD56, CD38, CD81, CD45
<u>Bronkoalveolar Lavaj İmmüfenotiplendirme</u>	CD15, CD1a, CD117, CD13, CD16, CD9, CD45
<u>Bronkoalveolar Lavaj CD4 / CD8 Sayımı</u>	CD4, CD8, CD3, CD19, CD45
<u>Kronik Myelomonositer Lösemi Paneli</u>	CD16, CD56, CD19, CD34, CD7, CD14, CD3, CD45
<u>Mastositoz Paneli</u>	CD25, CD117, CD34, CD13, CD30, CD2, HLADR, CD45
<u>Kronik Lyme Paneli</u>	CD57, CD4, CD8, CD3
<u>İmmün Yetmezlik Paneli (CD4-CD8 Sayımı)</u>	CD4, CD8, CD3
<u>Lenfosit Alt Grubu</u>	CD16, CD56, CD4, CD8, CD19, HLADR, CD3
<u>Sezary Sendromu-Micozis Fungoides Paneli</u>	CD1a, CD2, CD3, CD9, CD7, CD4, CD8, CD21, CD45
<u>Trombosit Paneli</u>	CD41, CD61, CD45
<u>ZAP70 Paneli</u>	CD16, CD19, CD3, ZAP70

	SENSBIO TEST KATALOĐU			
	Doküman No	SNB.06	Yürürlük Tarihi	01.02.2025
	Revizyon Numarası	00	Revizyon Tarihi	

Önemli not: Yukarıda verilen sonuç tarihleri, laboratuvardan (cihaz arızası, otomasyon arızaları v.b) ya da numuneden kaynaklanan bir problem (yetersiz, uygunsuzluk v.b) durumunda değişebilir. Bu durumda ilgili hastanenin sekreterlikleri ve kurum yetkilileri bilgilendirilir.